

# ESTELITE UNIVERSAL FLOW

## ESTELITE UNIVERSAL FLOW® Medium A2

**Estelite Universal Flow on matalaviskoosinen (medium Flow), valokovetteinen yhdistelmämuovi, jota voidaan käyttää retentiolangan kiinnittämiseen.**

- Korvaa Estelite Flow Quick -flown
- Erinomainen käsiteltävyys: ei tahmaa, helppo viedä, täydellinen koostumus
- Erittäin pieni kovetuskestävyys
- Esteettinen

### Käyttövinkki:

- Puhdista hampaat Salutem-hohkakivipastalla. Huuhtele ja kuivaa.
- Etsaa linguaalipinnat. Huuhtele hyvin, kuivaa.
- Levitä sidostusainetta (esim. Ortho Solo) ohuesti ja valokoveta tarvittaessa.
- Asettele retentiolanka paikoilleen.
- Annostele flow-muovi retentiolangan päälle yhdelle tai muutamalle hampaalle kerrallaan. Ei vaadi muotoilua vaan asettuu itsestään paikoilleen.
- Koveta 5-10 sek/ hammas valokovettimen tehosta riippuen.

### Sisältää:

bisfenoli-A di(2-hydroksipropoksi)dimetakrylaattia (Bis-GMA), bisfenoli-A polyetoksi-metakrylaattia (TEDGMA), 1,6bis (metakryloksietyylioksikarbonyyli-amino)trimetyyliheksaania (UDMA), mekvinolia, dibutyylhydroksyyli-toluleenia sekä UV-suojan.

Estelite Universal Flown mediumin sisältämien pallofillereiden (71 % painosta, 57 % tilavuudesta) ansiosta saavutetaan erinomainen kiillon säilyvyys ja kulutuskestävyys.



**ORTOMAT HERPOLA**

Artukaistentie 15

20240 TURKU

ortomat@ortomat-herpola.fi

02 276 4700

### Säilytys:

Säilytä 0-25° C:n lämpötilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta. Voidaan säilyttää jääkaapissa. Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi (18-30° C) ennen käyttöä, sillä liian kylmä materiaali voi olla vaikea puristaa ulos.



Pakkauskoko 1,0 ml (1,7 g)

Valmistaja: Tokuyama Dental,  
Japani