

Yleisiä vaiheita LM-Activator™ -mallin valintaan



Alla oleva valintakaavio sisältää yleisiä perusohjeita oikean LM-Activator™-kojeen valitsemiseen potilaalle. Hoitava lääkäri on vastuussa sen arvioimisesta ja määrittämisestä, mikä malli sopii yksittäiselle potilaalle parhaiten.

VAIHE 1

? Purentavien tyyppi?

- Suurentunut horisontaalinen ylipurenta
- Suurentunut vertikaalinen ylipurenta/syväpurenta
- Ahtausetalueella
- Dentoalveolaarinen ristipurenta etualueella
- Rotaatiot etualueella → LOW
- AII-luokka
- Saksipurenta
- Sivualueen ristipurenta
- Ylipuhjennutyläetualue eli gummy smile

- Etualueen avopurenta (Käytä LM-Activatorin™ High-mallia) → HIGH

? Kasvumalli/ kasvojen tyyppi?

- Low → LOW
- Neutral
- High → HIGH

- Low angle Short face Hypodivergent Brachyfacial
- Neutral angle Neutral growth pattern Mesofacial
- High angle Long face Hyperdivergent Dolichofacial

VAIHE 2

? Ovato pisyvät toiset molaarit jo puhjenneet?

- Ei → SHORT
- Kyllä Puhkeamassa → LONG

VAIHE 3

? Leveä hammaskaari?

- Standard → NARROW
- Leveä → WIDE

VAIHE 4

? Tarvitaanko vahvistusta inkisiivalueella?

- Kyllä → REINFORCED

Hoitava lääkäri on yksin vastuussa diagnoosista ja hoidosta. Hänen vastuullaan on myös määrittää potilaskohtaisesti, sopiiko tälle hoidossa käytettäväksi LM-Activator™, LM-Trainer™ tai jokin muu LM-Dentalin™ tuote, sekä vastata hoitotuloksista LM-Activator™- tai LM-Trainer™-kojetta tai muita LM-Dentalin™ tuotteita käytettäessä. Hammaslääkäri yksin päättää käytettävästä tuotteesta ja sen käytötavasta sekä valitsee tarvittaessa yksittäiselle potilaalle soveltuvan tuotteen. Noudata valmistajan käyttöohjeita.