

LM

feel the
difference

LM-Activator on pehmeästä silikonista valmistettu oikomiskoje ja aktivaattori.

Se ohjaa lapsen hampaiden ja leukojen suotuisaa kehitystä. Jos hammas ei puhkea oikeaan asentoon, LM-Activator pystyy ohjaamaan sitä varovasti oikealle paikalle ja oikeaan asentoon. Samanaikaisesti LM-Activator tukee kasvojen luonnollista kehitystä ohjaten ylä- ja alaleuan keskinäistä suhdetta oikeaksi.

Ohjaamalla purentankehitystä varhaisessa vaiheessa voidaan välttää vaikeiden purentavirheiden muodostuminen. LM-Activator ohjaa tarvittaessa hampaita ja leukoja pehmeästi estäen ja korjaten virheasennot.



”Se toimi hyvin. Ylipurentani oli melkein 1 cm, ja oikomishoidon jälkeen se oli enää jotain 3 millimetriä. Se toimi siis todella hyvin!”
14-vuotias tyttö, Ruotsi

Čirgić, E., Kjellberg, H., Hansen, K., & Lepp, M. (2015). Adolescents' experiences of using removable functional appliances. Orthodontic & craniofacial research

LMDental

Tarkemmat ohjeet saat hammaslääkäriltäsi.

Valmistaja: LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com



Lisätietoja:
www.lm-dental.com/LM-Activator

CE

0917 T194534 Oikeus muutoksiin pidätetään




LMActivator
-oikomiskojeen käyttö

Mikä on LM-Activator?

LM-Activator ohjaa hampaasi oikealle paikalleen

- kun uusia hampaita puhkeaa
- kun jokin hammas on väärässä paikassa

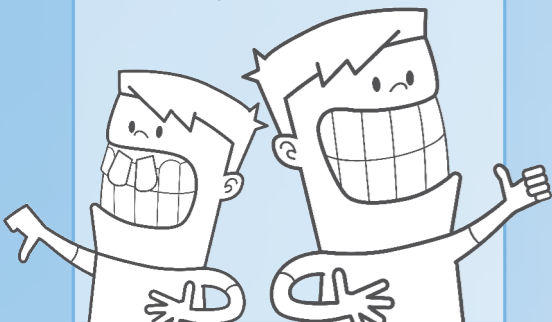

LM-Activator auttaa kasvoja kehittymään ja kasvamaan terveellä tavalla ohjaamalla leuan oikeaan asentoon.




LM-Activator ohjaa kieltäsi suunpohjalta kitlaen suuntaan.

Jos hammas on jo oikealla paikalla, LM-Activator auttaa sitä pysymään paikallaan.

Miten LM-Activator -oikomiskojetta käytetään?

Tarkista, että koje on oikein päin.

Laita LM-Activator suuhusi ja sulje suu.

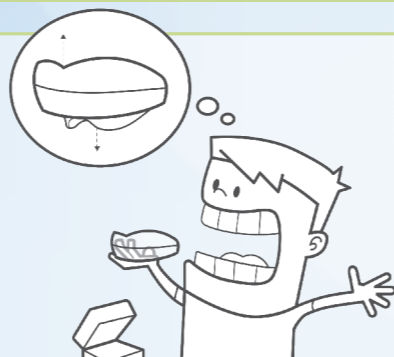

Noudata hammaslääkärisi ohjeita:

Käyttö päivällä: Kyllä Aika

Ei

Käyttö yöllä: Joka yö nukkuessa.

Muut ohjeet:

Ota LM-Activator ja päiväkirja mukaasi hammaslääkäriin vastaanotolle.

Pidä hampaasi LM-Activator -kojeessa, mutta älä pure äläkä liikuta leukaasi edestakaisin.



Ota yhteys hammaslääkäriisi seuraavissa tapauksissa:

- Tarvitset apua LM-Activator -kojeen käytössä tai ohjeiden noudattamisessa.
- LM-Activator -kojeesi vioittuu.
- Tunnet hankausta tai painetta usean päivän/viikon ajan.

Käytön aloittaminen

Mitä enemmän käytät LM-Activator -oikomiskojetta, sen helpompaa se on!

Totut siihen pian ja muistat helposti käyttää sitä.

Käytä LM-Activatoria päivällä esimerkiksi katsellessasi televisiota, pelatessasi tai tehdessäsi läksyjä.

Aluksi suusi saattaa väsyä samalla tavalla kuin muussakin harjoittelussa.

Se on normaalia ja häviää jonkin ajan kuluessa.



Ennen kuin olet tottunut LM-Activator -kojeeseen, se saattaa pudota suustasi nukkuessasi:

- Harjoittele LM-Activator -kojeen käyttöä myös päiväsaikaan.
- Pyydä vanhempiasi laittamaan LM-Activator takaisin suuhusi, jos he huomaavat sen pudonneen. Yleensä on helppoa nukahtaa uudelleen.

Tee käytöstä tapa


Aivosi noudattavat totuttuja tapoja lähes automaattisesti. Kun olet käyttänyt LM-Activator -kojetta joka yö neljän viikon ajan, siitä on tullut sinulle tapa!



LM-Activatoria on helpompi muistaa käyttää, jos laitat sen aina suuhusi heti tehtyäsi jotain sellaista, jota teet joka ilta (esim. harjattuaasi hampaasi, puettuasi yöpuvun tai sammutettuasi valon).

LM-Activator siirtää hampaitasi vähän kerrallaan joka yö. Jos unohdat sen, hampaat palautuvat takaisinpäin.

Kun menet kaverin luo yökylään, muista pakata LM-Activator mukaan reppuusi.

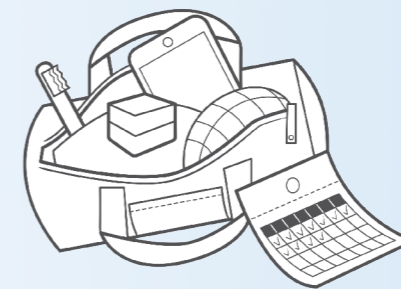

Seuraa edistymistäsi

Pidä päiväkirjaa tai käytä jotain sovellusta, esim. Habitica, Coach.me, HabitSeed, chain.cc tai Habitforge.

Lupaa itsellesi palkinto esim. kolmen viikon käytön jälkeen.

Ota kuvia hampaistasi kuukausittain nähdäksesi eron.



Tulet saamaan kauniin hymyn!



Pidä kojeesi siistinä ja puhtaana

Huuhtelee LM-Activator ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Tarvittaessa:

- Pese koje hammasharjalla ilman hammastahnaa.
- Desinfioidi kiehuvaassa vedessä (vähintään minuutin ajan).
- Pese kotelo astianpesukoneessa.

